

medi

medi travel® *women*

medi travel® *men*

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi.
Instrucciones de uso. Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso.
Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning. Bruksanvisning. Návod k použití.
Uputa za uporabu. Инструкція по використанню. Kullanna kılavuzu.
Instrukcja zakładania. Használati útmutató. Інструкція з використання. Navodila za uporabo. Návod na použitie.



medi. I feel better.



1



2



3



4



medi compression

Разница, которую можно почувствовать

Функциональная продукция для улучшения Вашего самочувствия

Более 60 лет исследований и совместной творческой работы врачей, инженеров, технологов и дизайнеров компании medi по совершенствованию компрессионных изделий позволили создать и внедрить в производство комплекс уникальных инновационных технологий, объединенных под новым товарным знаком компании - medi compression. Компрессионные изделия, производимые по этим технологиям, гарантируют правильное с медицинской точки зрения распределение давления, хорошее самочувствие и исключительные потребительские свойства.

Сделано в Германии.

medi travel® *women*

Компрессионные гольфы для путешествий с гладкой текстурой. Путешествуйте с комфортом, возвращайтесь отдохнувшими!

medi travel® *men*

Компрессионные гольфы для путешествий с рифленой текстурой. Путешествуйте с комфортом, возвращайтесь отдохнувшими!

- В результате длительного пребывания в сидячем положении во время путешествия циркуляция венозной крови замедляется.
- На борту самолета давление воздуха ниже, чем давление воздуха на земле. Это также замедляет венозный кровоток.

- Сухой воздух в салоне самолета способствует обезвоживанию организма. Поэтому кровь становится более вязкой.

Принцип действия и преимущества

Оказывают физиологически распределенное давление в области голени, убывающее в направлении от лодыжек к колену. Благодаря этому улучшают венозное кровообращение.



Подходящий размер найдется для каждого.



Комфортный микроклимат в любое время года.



* Свежесть в течение всего дня.

*для medi travel *women*

Состав материала

medi travel *women* 75% полиамид
25% эластан

medi travel *men* 90% полиамид
10% эластан

Инструкция по стирке

- Стирайте изделие каждый раз после использования.
- Возможна ручная или деликатная машинная стирка при температуре воды 40°C.
- Используйте моющие средства для деликатных или шерстяных тканей, не обладающие отбеливающим и смягчающим эффектами.
- Сушите изделие сразу после стирки на открытом воздухе. (Не оставляйте влажные гольфы лежать на полотенце, отопительной батарее и под прямыми солнечными лучами).



Щадящий режим стирки



Не отбеливать



Сушка при ограниченной тепловой нагрузке



Не гладить



Химическая чистка не допускается



Не содержит латекс

Данные изделия производятся без содержания резины,

которую получают из млечного сока тропических растений.

Особые указания

- Хранить в сухом месте при комнатной температуре.
- Защищать от жары и влаги.
- Чтобы избежать повреждений на гольфах при надевании, будьте аккуратны, если у Вас длинные ногти или если Вы носите на пальцах кольца!
- Шершавая и ороговевшая кожа на пятках часто является причиной повреждения трикотажа.
- Пожалуйста, обращайте внимание на состояние Вашей обуви - дефекты внутренней поверхности обуви могут быстро привести к повреждению изделия.

Абсолютные противопоказания

- Хронические облитерирующие заболевания периферических артерий
- Тяжелые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии
- Декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность

- Трофические язвы невенوزной этиологии
- Острая инфекция мягких тканей
- Септический флебит
- Индивидуальная непереносимость материала

Относительные противопоказания

- Нарушение чувствительности

Измерения для подбора размера



Длина окружности самой узкой части голени над лодыжками, см



Длина ноги от стопы до уровня на два пальца ниже подколенной складки, см

Для определения размера и длины гольфов необходимо руководствоваться рисунками и таблицей на обратной стороне упаковки изделия.

Рекомендации по надеванию

Выверните изделие наизнанку до той части, которая надевается на стопу. Наденьте изделие на стопу. Обратите внимание на правильность расположения пяточной части. Равномерно, не перекручивая, расправьте изделие по ноге. Убедитесь в том, что изделие не образует складок и не вызывает сдавливания. Никогда не подворачивайте верхний край изделия. Это приводит к локальному повышению давления, ухудшению кровотока и неприятным ощущениям (см. также рисунки в начале международной инструкции по использованию).

Служба информации
medi в России
+7 (495) 921-39-37
www.medirus.ru